

Nye prøvetagningsmedier til *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* og *Mycoplasma genitalium*

I forbindelse med udskiftning af prøvetagningsmedier er vores vejledninger til rekvirenter opdateret.

Herunder en oversigt over hvilke pødepinde der skal anvendes:

Lokalisation	Pødepind	OBS!
Urethra	Den tynde, klare pødepind	
Cervix	Den tynde, klare pødepind	Brug den medfølgende hvide tykke vatpødepind til at fjerne overskydende slim fra livmodermunden og de omgivende slimhinder. Kasseres efter brug.
Vagina	Den hvide tykke vatpødepind	Den tynde, klare pødepind bruges slet ikke.
Rectum		
Tonsil/svælg		
(Øje)		

Prøvetagningsvejledningerne findes i e-Dok, se:

[1.3. Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae \(gonokok\) DNA \(kombineret undersøgelse\)](#)

[1.3. Mycoplasma genitalium DNA inklusiv undersøgelse for mutationer, der giver makrolid-resistens](#)

Her findes også bestillingsnumre på de nye prøvetagningsmedier.

De gamle Aptima prøvetagningsmedier kan kun anvendes indtil 31. januar 2019, da analyse-apparatet til dette herefter udfases.

Svend Ellermann-Eriksen
ledende overlæge, dr.med.

Birgitte Tønning
ledende bioanalytiker