

Nyhedsbrev fra Klinisk Mikrobiologi, AUH Januar 2025 – almen praksis:

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Forsendelse af uafkølet urin uden stabilisator indebærer risiko for falsk positive dyrkningsresultater og dermed risiko for forkert behandling af patienten. For at sikre optimal specificitet indsendes uriner til dyrkning og resistensbestemmelse rutinemæssigt i urinmonovette med borsyre. Dette transportmedium kræver dog, som minimum, 9 mL urin.

Klinisk Mikrobiologi introducerer nu et alternativ til patienter med lille urinmængde i form af BD Vacutainer® Plus C&S, der kun kræver 4 (min. 3) mL urin.

BD Vacutainer® Plus C&S, kan kun anvendes til urindyrkning og resistensbestemmelse.



BD Vacutainer® Plus C&S **bestilles hos RM Indkøb** varenummer **30044623**. Bemærk at der samtidigt skal bestilles en adapter varenummer **30037944**.

For yderligere information vedrørende brug af transportmedier og urindyrkning henvises til Klinisk Mikrobiologi's vejledninger for rekvirenter [Urin, dyrkning og resistensbestemmelse, KMA, regional retningslinje](#) samt [Valg af rette mikrobiologisk transportmedium, KMA, regional retningslinje](#) i e-Dok.

Med venlig hilsen

Birgitte Tønning
chefbioanalytiker

Jan Berg Gertsen
overlæge